

Orificio de Aspiración



100% Latex-Free

100% Compatible MRI

Oasis™

Drenaje Torácico de aspiración en seco



Botella de AGUA*

Instalación

Paso 1. Llenar el cierre hidráulico hasta la marca de los 2cm
Introducir 45ml de agua o solución salina estéril a través del orificio de aspiración azul situado en la parte superior del dispositivo de drenaje. Los drenajes Oasis™ son suministrados con una botella de agua estéril situada en su parte posterior (imagen 1)

Retirar el tapón de la botella e insertar la punta en el orificio de aspiración azul (imagen 2). Apretar la botella para vaciar el contenido dentro del cierre hidráulico hasta que el líquido alcance la marca de 2cm.

Paso 2. Conectar el drenaje Oasis™ al paciente
Conectar el tubo a paciente del drenaje al tubo torácico del paciente antes de iniciar la aspiración.

Paso 3. Conectar la fuente de aspiración al drenaje torácico
Acoplar la línea de aspiración al orificio azul de aspiración que se encuentra en la parte superior del dispositivo de drenaje torácico (imagen 3).

Paso 4. Activar la fuente de aspiración
Aumentar el vacío en la fuente de aspiración hasta -80mmHg o vacío superior. El regulador de aspiración está pre-establecido en -20cmH₂O. Ajustar según se requiera.

imagen 1

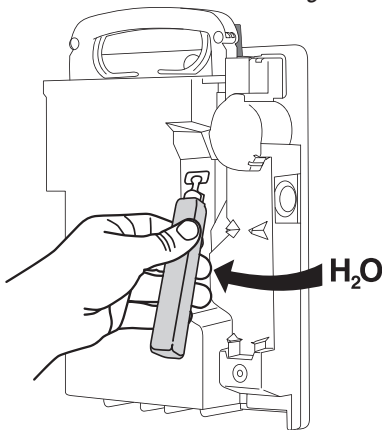


imagen 2


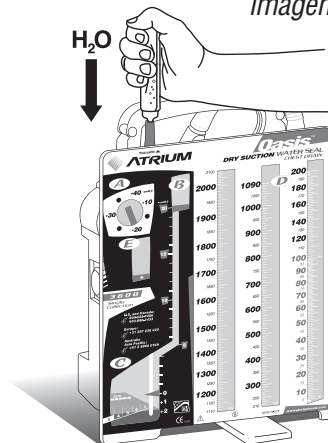


imagen 3



Para Consultas y Asistencia Técnica
Teléfono E.U. +1 800 528 7486
Europa +31 297 230 420

*Patentado

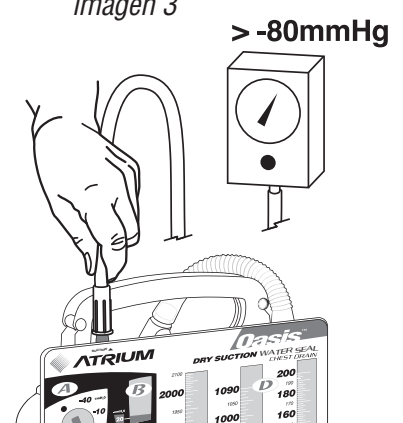

Material de Formación sobre Drenaje Torácico en www.atriumU.com.



ATRIUM

www.atriummed.com